

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN Vobexoryn 6 mg/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Instructies voor gebruik van Vobexoryn 6 mg/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u uw Vobexoryn voorgevulde pen gebruikt.

Gebruik de pen niet zonder de juiste training door uw arts of verpleegkundige.

Begin met het controleren van de pen; **verzekert u ervan dat de pen Vobexoryn 6 mg/ml bevat**. Bekijk vervolgens de onderstaande afbeeldingen om de verschillende onderdelen van uw pen en naald te leren kennen.

Als u blind of slechtziend bent en het dosisafleesvenster op de pen niet kunt lezen, gebruik deze pen dan niet zonder hulp. Vraag hulp van een persoon met een goed gezichtsvermogen die geoefend is in het gebruik van de Vobexoryn voorgevulde pen.


Uw pen is een voorgevulde pen met draaibare dosisinstelknop. De pen bevat 18 mg liraglutide en levert doses van 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg en 3,0 mg.

BD Ultra fine™ of NovoFine® wegwerpnaalden zijn aanbevolen voor gebruik met dit apparaat. Naalden zijn niet bijgesloten in de verpakking.

Belangrijke informatie


Besteed speciale aandacht aan deze opmerkingen, omdat deze belangrijk zijn voor een veilig gebruik van de pen.

Liraglutide Injectiepen en naald (voorbeeld)

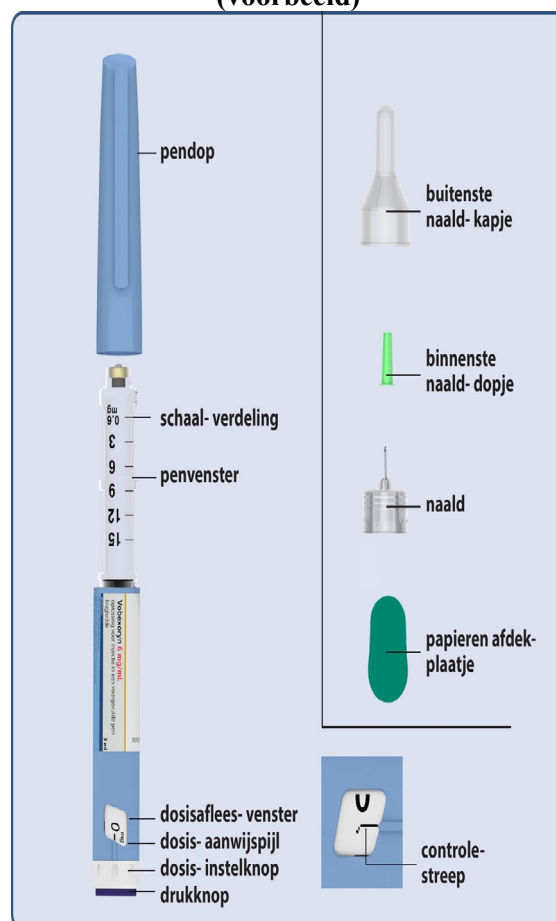


1 Uw pen van een nieuwe naald voorzien

- **Controleer de naam en het gekleurde etiket** op uw pen om er zeker van te zijn dat deze Vobexoryn 6 mg/ml oplossing voor injectie bevat. Dit is vooral belangrijk als u meer dan één soort injecteerbaar medicijn gebruikt. Gebruik van het verkeerde medicijn kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.
- **Haal de pendop van de pen.**



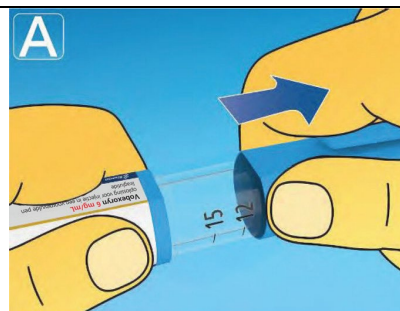


- **Controleer of de oplossing in de pen helder en kleurloos is.** Kijk door het penvenster. Als de oplossing er troebel uitziet, moet u de pen niet gebruiken.

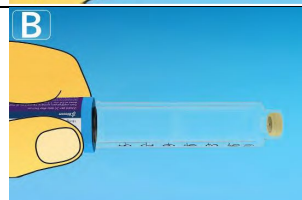

- **Neem een nieuwe naald** en verwijder het papieren afdekplaatje.

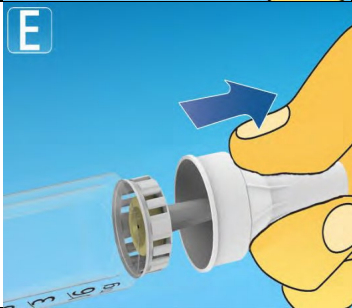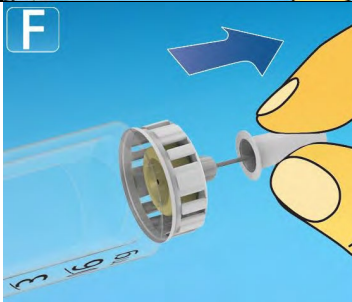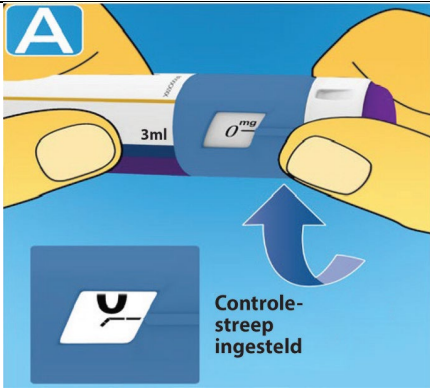

• Druk de naald recht op de pen. Draai de naald vast.	
• Haal het buitenste naaldkapje eraf en bewaar het voor later. U heeft deze na de injectie nodig om de naald veilig van de pen te halen.	
• Verwijder het binnenste naalddopje en gooi deze weg. Als u het probeert terug te plaatsen, zou u uzelf per ongeluk aan de naald kunnen prikken. Een druppel oplossing kan aan de naaldpunt verschijnen. Dit is normaal, maar u moet nog steeds de toevoer controleren als u een nieuwe pen voor de eerste keer gebruikt. Bevestig pas een nieuwe naald op de pen als u klaar bent om de injectie toe te dienen. ⚠ Gebruik voor iedere injectie altijd een nieuwe naald. Zo kunt u het verstopt raken van de naald, besmetting, infectie en een onjuiste dosis voorkomen. ⚠ Gebruik nooit een verbogen of beschadigde naald.	
2 Controleer de toevoer • Vóór uw eerste injectie met elke nieuwe pen, Moet u de toevoer controleren. Als uw pen al in gebruik is, ga dan naar stap 3 'Uw dosis instellen'. • Draai de dosisinstelknop tot het dosisafleesvenster het controlestreepsymbool aangeeft (↵). • Houd de pen met de naald omhoog. Druk de drukknop in en houd deze ingedrukt totdat het dosisafleesvenster weer op 0 staat. Het cijfer 0 moet tegenover de dosisaanwijspijl staan. Er moet nu een druppel oplossing aan de naaldpunt verschijnen. Er kan een kleine druppel achterblijven aan de naaldpunt, maar deze wordt niet geïnjecteerd. Als er geen druppel verschijnt, herhaal dan stap 2 'Controleer de toevoer' maximaal 6 keer. Als er dan nog steeds geen druppel verschijnt, verwisselt u de naald en herhaalt u stap 2 'Controleer de toevoer' nog eenmaal.	

Als er dan nog steeds geen druppel verschijnt, gooit u de pen weg en gebruikt u een nieuwe.

⚠ **Controleer altijd of er een druppel verschijnt** aan de naaldpunt voordat u een nieuwe pen voor de eerste keer gaat gebruiken. U weet dan zeker dat de oplossing doorstroomt.

Als er geen druppel verschijnt, wordt er **geen** medicijn geïnjecteerd, zelfs niet wanneer het getal in het dosisaflaesvenster verandert. **Het ontbreken van een druppel kan wijzen op een verstopte of beschadigde naald.**

Als u voorafgaand aan uw eerste injectie met elke nieuwe pen niet de toevoer controleert, krijgt u mogelijk niet de voorgeschreven dosis en werkt Vobexoryn niet zoals bedoeld.



3 Uw dosis instellen

- **Draai aan de dosisinstelknop totdat uw dosis in het dosisaflaesvenster staat (0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg of 3,0 mg).**

Als u de verkeerde dosis instelt, kunt u de dosisinstelknop naar voren of achteren draaien om alsnog de juiste dosis in te stellen.

U kunt met de pen maximaal 3,0 mg instellen.

De dosisinstelknop verandert de dosis. Alleen het dosisaflaesvenster en de dosisaanwijspijl geven aan hoeveel mg u per dosis instelt. U kunt maximaal 3,0 mg per dosis instellen. Zodra de pen minder dan 3,0 mg bevat, stopt het dosisaflaesvenster voordat 3,0 wordt weergegeven. De dosisinstelknop maakt een ander klikgeluid wanneer deze naar voren, naar achteren of voorbij het aantal overgebleven mg wordt gedraaid. Tel niet het aantal klikken van de pen.

⚠ **Gebruik voordat u dit medicijn injecteert altijd het dosisaflaesvenster en de dosisaanwijspijl om te zien hoeveel mg u heeft ingesteld.**


Tel niet het aantal klikken van de pen.

Gebruik niet de schaalverdeling op de pen.

Deze geeft alleen aan hoeveel oplossing ongeveer nog in de pen zit.

Met de dosisinstelknop kunt u alleen doses van 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg of 3,0 mg instellen.

Het getal van de ingestelde dosis moet precies tegenover de dosisaanwijspijl staan om er zeker van te zijn dat u een correcte dosis krijgt.

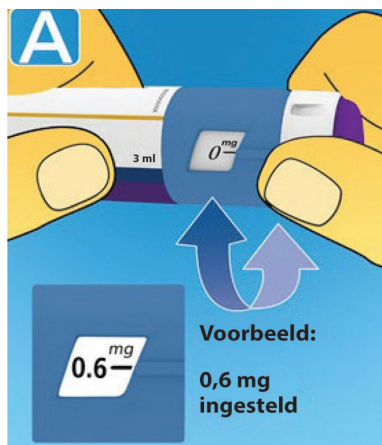

Hoeveel oplossing is er over?

- De **schaalverdeling** geeft aan hoeveel oplossing **ongeveer** nog in de pen zit. **Als u precies wilt zien hoeveel oplossing er nog in de pen zit**, gebruikt u het dosisafleesvenster:

Draai de dosisinstelknop totdat het **dosisafleesvenster stopt**.


Als 3,0 wordt weergegeven, zit er nog **ten minste 3,0 mg** in de pen. **Als het dosisafleesvenster stopt voordat 3,0 mg wordt weergegeven**, is er onvoldoende oplossing over voor een volledige dosis van 3,0 mg.

Als u meer medicijn nodig heeft dan er over is in uw pen

Alleen als het aan u is uitgelegd of is geadviseerd door uw arts of verpleegkundige, mag u uw dosis verdelen over uw huidige pen en een nieuwe pen. Gebruik een rekenmachine om de doses te berekenen volgens de aanwijzingen van uw arts of verpleegkundige.

⚠ Let er goed op dat u zorgvuldig rekent.

Als u niet goed weet hoe u uw dosis over twee pennen moet verdelen, gebruikt u een nieuwe pen voor het instellen en injecteren van de benodigde dosis.

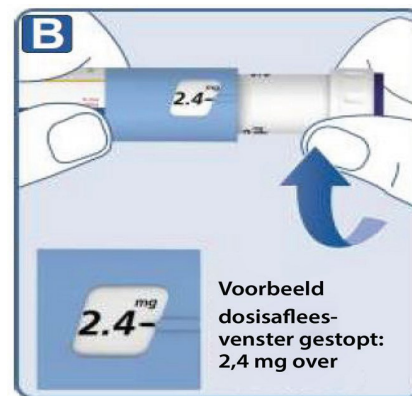


4 De dosis injecteren

- Steek de naald in de huid** op de manier die uw arts of verpleegkundige u heeft laten zien.
- Zorg dat u het dosisafleesvenster kunt zien.** Bedek het dosisafleesvenster niet met uw vingers. Hierdoor kan de injectie namelijk worden onderbroken.







- Druk de drukknop in en houd deze ingedrukt tot het dosisafleesvenster op 0 staat.** Het cijfer 0 moet tegenover de dosisaanwijspijl staan. U hoort of voelt nu mogelijk een klik.

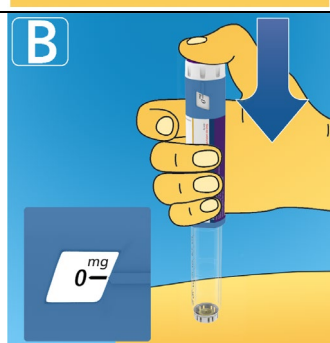

- Houd de naald in uw huid nadat het dosisafleesvenster weer op 0 staat en tel langzaam tot 6.**
- Als de naald eerder wordt verwijderd, kunt u een straal oplossing uit de naaldpunt zien komen. In dat geval wordt niet de volledige dosis toegediend.

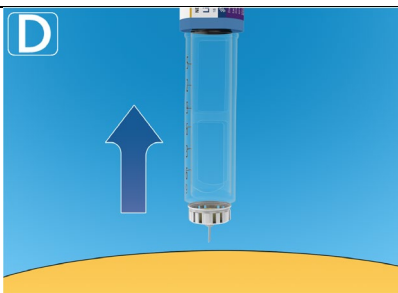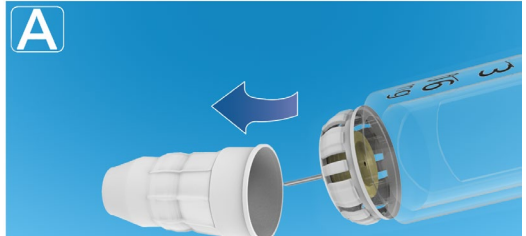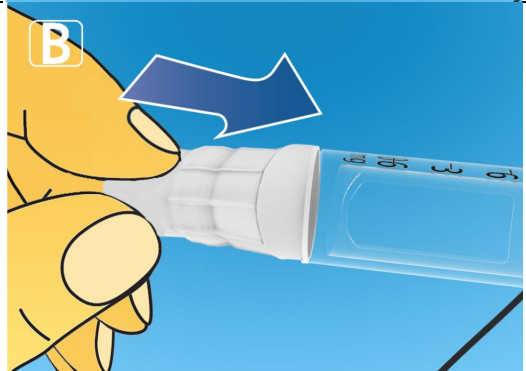

• Verwijder de naald uit uw huid. Als de injectieplaats gaat bloeden, drukt u hier zacht tegenaan. Wrijf niet over de plek. Na het injecteren ziet u mogelijk een druppel oplossing aan de naaldpunt. Dit is normaal en heeft geen invloed op uw dosis. ⚠ Blijf altijd naar het dosisaflaesvenster kijken, zodat u weet hoeveel mg u injecteert. Houd de drukknop ingedrukt totdat het dosisaflaesvenster op 0 staat. Hoe herkent u een verstopte of beschadigde naald? • Als na herhaaldelijk indrukken van de drukknop het dosisaflaesvenster niet op 0 komt te staan, heeft u mogelijk een verstopte of beschadigde naald gebruikt. • In dat geval heeft u geen medicijn toegediend gekregen, zelfs niet als het getal in het dosisaflaesvenster is veranderd ten opzichte van de ingestelde dosis. Wat moet u doen met een naald die is verstopt? Vervang de naald zoals beschreven in stap 5 'Na uw injectie' en herhaal alle stappen vanaf stap 1 'Uw pen van een nieuwe naald voorzien'. Stel de volledige benodigde dosis in. Raak het dosisaflaesvenster tijdens het injecteren niet aan. Hierdoor kan de injectie worden onderbroken.	
5 Na uw injectie • Leg het buitenste naaldkapje op een vlakke ondergrond en plaats de naaldpunt daarin, zonder een van beide aan te raken.	
• Druk wanneer de naald bedekt is, het buitenste naaldkapje zorgvuldig volledig aan. • Schroef de naald los en gooi deze op zorgvuldige wijze weg.	
• Plaats de pendop na elk gebruik terug op uw pen ter bescherming van de oplossing tegen licht. Gooi de naald na elke injectie altijd weg om het injecteren zo makkelijk mogelijk te maken en verstopte	

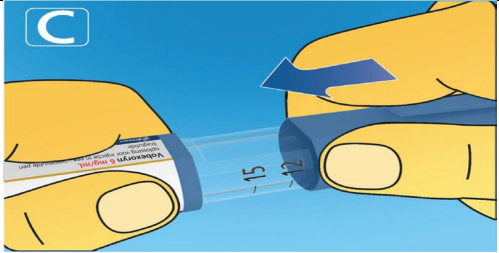naalden te voorkomen. Als de naald verstopt is, injecteert u geen medicijn. Als de pen leeg is, gooi deze dan weg zonder een naald erop, zoals voorgeschreven door uw arts, verpleegkundige, apotheker of plaatselijke overheden. ⚠ Probeer nooit het binnenste naalddopje op de naald terug te plaatsen. U zou zich kunnen prikken aan de naald. ⚠ Verwijder altijd de naald van uw pen na iedere injectie. Zo voorkomt u het verstopt raken van de naald, besmetting, infectie, lekkage van de oplossing en een onjuiste toediening.	
⚠ Andere belangrijke informatie • Houd uw pen en naalden altijd buiten het zicht en bereik van anderen, vooral van kinderen. • Deel nooit uw pen of uw naalden met andere mensen. • Verzorgers moeten zeer voorzichtig zijn bij het omgaan met gebruikte naalden – om prikaccidenten en kruisbesmetting te voorkomen.	
Zorgen voor uw pen • Laat de pen niet achter in een auto of een andere plaats waar het te warm of te koud kan zijn. • Vobexoryn die bevroren is geweest, mag niet worden geïnjecteerd. Als u toch Vobexoryn gebruikt die bevroren is geweest, werkt dit medicijn mogelijk niet zoals bedoeld. • Stel uw pen niet bloot aan stof, vuil of vloeistof. • Uw pen niet afwassen, onderdompelen of smeren. Maak het indien nodig schoon met een mild schoonmaakmiddel en een vochtige doek. • Laat uw pen niet vallen of tegen een hard oppervlak stoten. Als u de pen laat vallen of een probleem vermoedt, moet u een nieuwe naald plaatsen en de toevoer controleren voordat u injecteert. • Probeer uw pen niet opnieuw te vullen. Als de pen leeg is, moet deze worden weggegooid. • Probeer uw pen niet te repareren of uit elkaar te	

halen.	
--------	--